



Bezdech senny | Wentylacja mechaniczna | Maski ▲

# Poradnik – maski oddechowe

*A Company of the Löwenstein Group*

**WEINMANN**  
medical technology

# Poradnik – maski oddechowe

## Jaką maskę Weinmann wybrać?

Maska jako łącznik pomiędzy pacjentem a urządzeniem wspomagającym oddech jest kluczowym elementem mającym wpływ na wyższą tolerancję terapii przez pacjenta oraz sukces prowadzonego leczenia. Najważniejszą kwestią jest dopasowanie kołnierza maski, która łączy indywidualny profil twarzy pacjenta z maską.

Kształty twarzy znacznie się różnią. Oprócz długości i szerokości twarzy oraz nosa, pochodzenie etniczne pacjenta ma wpływ na charakterystykę twarzy.

Weinmann oferuje szeroki wybór masek nosowych oraz twarzowych, które są zaprojektowane tak by spełniać osobiste potrzeby pacjentów. Niniejszy poradnik został stworzony by pomóc w dokonaniu prawidłowego wyboru.

## Rozmiary

Oferta Weinmann obejmuje maski nosowe i twarzowe w prawie wszystkich dostępnych rozmiarach:

XS	S	M	L	XL	LW
JOYCE SilkGel S	JOYCEeasy S	JOYCEeasy M	JOYCEeasy L	JOYCE XL	JOYCE XL

**Jeden rozmiar dla wszystkich: JOYCEone**

## Typy masek

Szczególne cechy kołnierzy masek nosowych oraz ustno-nosowych:



### JOYCEone

One size / szeroka i elastyczna część nosowa



### JOYCEeasy

Poszerzona i wydłużona część nosowa w stosunku do modelu JOYCE



### JOYCE SilkGel

Węższa część nosowa / żelowe wypełnienie



### JOYCE

Węższa część nosowa / rozmiary S–XL

Rys. Kształt: kołnierz nosowy



### JOYCEone Full Face

One size / szeroki i elastyczny grzbiet nosa



### JOYCEeasy Full Face

Poszerzona i wydłużona część nosowa w stosunku do modelu JOYCE



### JOYCE SilkGel Full Face

wąski obszar grzbietu nosa / wypełnienie żelowe



### JOYCE Full Face

Węższa część nosowa / rozmiary S–XL

Rys. Kształt: kołnierz ustno-nosowy

## Maski

### JOYCEone

#### Rozpocznij od JOYCEone



Maska ta jest odpowiednia dla ok. **85 %** pacjentów. Należy pamiętać, że kołnierz maski przylega elastycznie wzdłuż nasady nosa i dookoła podbródka, tak że maska może być osadzona na twarzy w różnych pozycjach tj. odrobinę wyżej lub niżej.

Należy dopasować górną część uprząży maski uszczelniając maskę, możliwie jak najluźniej. Proszę pamiętać, że mechanizm sprężynowy opierający się na czole zapewnia odpowiedni dystans pomiędzy nasadą nosa i czołem.

Jeżeli maska pod wpływem ciśnienia terapeutycznego nie przylega szczelnie należy wówczas odsunąć lekko maskę od twarzy pacjenta i założyć ją z powrotem. Dzięki temu do kołnierza maski może dostać się powietrze, które go wypełni.

W przypadku **pacjentów pochodzenia azjatyckiego JOYCEone** jest zalecana ze względu na głębszy i szerszy obszar grzbietu nosa.

**Model Nasal i Full Face**



### JOYCEeasy

Jeśli w przypadku stosowania JOYCEone:

- maska nie przylega szczelnie w obszarze grzbietu nosa,
- nie można ustawić prawidłowego odstępu wspornika czołowego
- rozmiar maski nie jest optymalny,

należy wówczas zdecydować się na maskę **JOYCEeasy** i dobrać jej właściwy **rozmiar S, M lub L** (na podstawie doświadczenia, przy użyciu szablonu, lub trzymając poduszkę na nosie lub twarzy).

Również w tym przypadku uprząż maski należy ustawić możliwie jak najluźniej.

Odległość pomiędzy czołem a grzbietem nosa można ustawić na stałe poprzez właściwe ustawienie odstępu wspornika czołowego.

**Model Nasal i Full Face**



### JOYCE

**JOYCE** to właściwy wybór dla osób z długim nosem lub o podłużnych kształtach twarzy, ponieważ jest ona dostępna również w **rozmiarze XL**.

**Model Nasal i Full Face**




### JOYCE SilkGel

Jeżeli pacjent preferuje **maskę żelową**, gdyż dla niego jest **bardziej miękka**, należy wówczas zdecydować się na maskę **JOYCE SilkGel** i dobrać jej właściwy rozmiar S, M lub L zgodnie z powyższym opisem.

Przy **terapii wysokim ciśnieniem** maska JOYCE SilkGel zapewnia z reguły lepszą szczelność niż maska silikonowa.

**Model Nasal i Full Face**

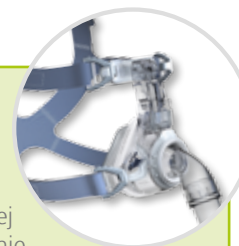

### JOYCE Full Face<sup>plus</sup>

W przypadku **pacjentów z brodą i/lub osłabionymi mięśniami szczęki** można użyć maski **JOYCE Full Face<sup>plus</sup>** (dostępnej w rozmiarach S – XL), gdyż maska ta **obejmuje brodę**.



## Przegląd




### JOYCEone

pierwsze dopasowanie – uniwersalny rozmiar



### JOYCEeasy

szybkie dopasowanie – zróżnicowane rozmiary

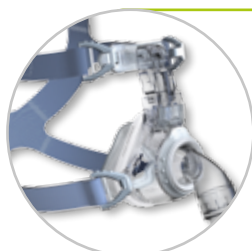

### JOYCE SilkGel

wyższe ciśnienia terapeutyczne – maska żelowa



### JOYCE

długie twarze/nosy, XL



### JOYCE Full Face<sup>plus</sup>

pacjenci z brodą, osłabienie mięśni

Firma Weinmann Geräte für Medizin GmbH + Co. KG zajmują się projektowaniem, produkcją i sprzedażą urządzeń diagnostycznych i terapeutycznych przeznaczonych do terapii zaburzeń snu i oddychania.

Produkty tego rodzinnego hamburskiego przedsiębiorstwa są precyzyjnie dopasowane do potrzeb pacjentów i ekspertów a przed wprowadzeniem do sprzedaży są poddawane certyfikowanemu procesowi walidacji: w obszarze badań i projektowania, zaopatrzenia, produkcji i zarządzania jakością.

Firma Weinmann, wchodząca od roku 2013 w skład grupy Löwenstein – dzięki swoim pomysłom, doświadczeniu i wybiegającym w przyszłość innowacjom – plasuje się dziś na wielu światowych, jakże wymagających rynkach w pierwszej trójce producentów. A także dzięki zaufaniu, jakim dążą firmę Weinmann klienci na całym świecie stawiając na sprawdzone produkty sygnowane znakiem made in Germany.

[weinmann-medical.com](http://weinmann-medical.com)

#### Niemcy

Weinmann Geräte für Medizin GmbH + Co. KG  
Kronsaalsweg 40 ■ 22525 Hamburg

E: [info@weinmann-medical.com](mailto:info@weinmann-medical.com)  
[weinmann-medical.com](http://weinmann-medical.com)

T: +49 (0)40-5 47 02-0  
F: +49 (0)40-5 47 02-461

Center for Production, Logistics, Service  
Weinmann Geräte für Medizin GmbH + Co. KG  
Siebenstücken 14 ■ 24558 Henstedt-Ulzburg

#### Francja

Weinmann S.A.S. – Paris-Igny  
T: +33-(0)1 69 35 53 20  
[weinmann-france.fr](http://weinmann-france.fr)



#### Rosja

Weinmann SPb GmbH – Moskau  
T: +7-(812)6-33 30 82  
[weinmann.ru](http://weinmann.ru)



#### Chiny

Weinmann GmbH + Co. KG  
(Shanghai Rep. Office)  
T: +86 21 32 26 26 98  
[weinmann.cn](http://weinmann.cn)



partner for life

A Company of the Löwenstein Group

**WEINMANN**  
medical technology